

Pose d'un masque chirurgical



1- Déplier le masque, le tenir par le haut (baguette) et passer les doigts dans les élastiques (côté bleu légèrement brillant à l'extérieur)



2- La face absorbante (côté blanc) est à appliquer sur la bouche



3- Positionner le masque sur le nez et la bouche en incluant le menton



4- Accrocher le masque : passer les élastiques derrière les oreilles



5- Modeler la barrette et ajuster la au contour du nez avec vos deux index



6- Assurer l'étanchéité du masque : Le nez, la bouche et le menton doivent être recouverts

PENDANT LE PORT DU MASQUE, NE PAS LE TOUCHER

POUR ENLEVER LE MASQUE, MANIPULEZ LE MASQUE PAR LES LIENS

LAVEZ VOUS LES MAINS OU PASSEZ LES AU GEL HYDRO ALCOOLIQUE